



Incidin Plus Desinfektionsmittel

pure¹¹-Nr.: 09109, Hersteller: ECOLAB

Zusammenfassung

- Neue pure11-Artikelnummer (ab 01.07.2023): 1109109
- Flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion und von Medizinprodukten
- Wirksam gegen Bakterien (auch MRSA und TB), Pilzen
- Begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung (inkl. HIV, HBV, HCV)
- Papova-, Adeno-, Rota-Viren
- QAV- und aldehydfrei
- Frischer Duft
- Keine leichtflüchtigen Rezepturbestandteile
- Keine QAV-vergleichbaren Klebeeffekte
- Ausgezeichnete Reinigungsleistung
- Zertifiziert gemäß DGHM- & ÖGHMP-Richtlinie
- Nachfüllflasche für Zwangsdosierer
- Bitte beachten: Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Empfohlene Reinraumklassen

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ISO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| GMP | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 09109

Herst.-Nr.: 30 115 10 / VE: 1 Stück

Quelle: <https://www.pure11.de/incidin-plus-desinfektionsmittel-1>

DAS PLUS AN SICHERHEIT FÜR ALLE OBERFLÄCHEN

Incidin® Plus

Flächendesinfektionsmittel mit Glucoprotamin®,
aldehydfrei und ohne QAV

RKI-GELISTET
(A)

**Breites Wirkspektrum gegen
Bakterien (inkl. MRSA, TB) und Hefen.**

Hohe Desinfektionssicherheit auf
allen abwaschbaren Flächen, selbst
in Risikobereichen.

- ▶ Patentierter Wirkstoff Glucoprotamin®
- ▶ Breites Wirkspektrum
- ▶ Hervorragende Reinigungsleistung
- ▶ RKI-gelistet



Incidin® Plus

Flächendesinfektionsmittel mit Glucoprotamin®,
aldehydfrei und ohne QAV

| Unsere Leistung | Ihr Nutzen |
|---------------------------------------|---|
| Patentierter Wirkstoff Glucoprotamin® | Optimale Desinfektion und Reinigung in Kombination mit vollständiger, biologischer Abbaubarkeit |
| Hervorragende Reinigungsleistung | Zusatz von Reinigungsadditiven nicht notwendig |
| RKI-gelistet | Einsetzbar auch im Seuchenfall |

| WIRKSAMKEIT | KONZENTRATION % | ml/L | EINWIRKZEIT Min. |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| VAH-Liste (bakterizid, levurozid) | | | |
| Flächendesinfektion gemäß DGHM 2001, mit Mechanik, mit geringer und hoher Belastung | 0,25 0,5 1 2 | 2,5 5 10 20 | 240 60 30 15 |
| IHO-Viruzidie-Liste | | | |
| Prüfung nach DVV/RKI-Leitlinie 2008 (hohe Belastung) | | | |
| Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) gemäß RKI-Empfehlung 1/2004 | 0,25/0,5 | 2,5/5 | 30/15 |
| Rotavirus | 0,5 | 5 | 30 |
| Adenovirus | 2 | 20 | 120 |
| Papovavirus/Polyomavirus/SV40 | 3 | 30 | 60 |
| EURO-Normen (geringe und hohe Belastung) | | | |
| EN 13697 (bakterizid) | 0,25 | 2,5 | 5 |
| EN 13697 (levurozid) | 0,25 | 2,5 | 15 |
| Flächendesinfektion nach DGHM 2001 (geringe und hohe Belastung) | | | |
| Mykobakterizid, mit Mechanik | 1,5/3 | 15/30 | 60/30 |
| RKI-Liste Flächendesinfektion | | | |
| Gem. § 18 IfSG (Desinfektion im Seuchenfall) | | | |
| Wirkungsbereich A | 8 | 80 | 360 |

ECOLAB HEALTHCARE EUROPE

Richtstrasse 7
8304 Wallisellen
Schweiz
+41(0)44-877-2000
www.ecolab.eu

© 2015 Ecolab Inc. Alle Rechte vorbehalten.

REGIONAL OFFICE

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
+49(0)2173-599-1900
www.ecolabhealthcare.de



ÖKOLOGISCH.
EINZIGARTIG.
VERLÄSSLICH.



Oberflächendesinfektion für Medizinprodukte



Flüssiges Desinfektionsmittelkonzentrat zur Desinfektion von Flächen aller Art.
Ⓢ BIOZID N-11720

ANWENDUNGSHINWEISE

Gebrauchslösung durch Verdünnen mit Wasser (max. 30 °C) in der gewünschten Konzentration ansetzen.

Zu behandelnde Fläche feucht abwischen. Dabei auf gleichmäßige Benetzung achten.

Laut UVV sind Schutzhandschuhe zu tragen.

Amin- bzw. aminderivat-haltige Desinfektionsmittel und aldehydhaltige Desinfektionsmittel sind nicht im Wechsel anwendbar. Bei Umstellung ist eine gründliche Zwischenreinigung notwendig.

ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g ist als Wirkstoff enthalten: 26 g Glucoprotamin®

GUTACHTEN

Umfangreich geprüft – mikrobiologisch, virologisch, toxikologisch und ökologisch.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere aktuellen Gutachten zur Verfügung.

BESTELLINFORMATIONEN

| Produkt | Verpackungseinheit | Artikelnummer |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Incidin® Plus Dosierbeutel | 400 x 20 ml | 30 125 20 PZN 006 153 97 |
| Incidin® Plus Nachfüllflasche | 3 x 2 L | 30 115 10 PZN 073 281 81 |
| Incidin® Plus Kanister | 6 L | 30 115 20 PZN 069 525 75 |
| Incidin® Plus Kanister | 30 L | 30 115 30 |
| Incidin® Plus Fass | 200 L | 30 115 40 |

BIOZIDE SICHER VERWENDEN.
VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG UND PRODUKTINFORMATION LESEN.

